

Comment la bibliothèque est-elle importée dans votre système **Exocad**?

1. fermez votre logiciel Exocad
2. dézippez le dossier «zeramex_exocad_v2»
3. déplacez le dossier dézippé dans le répertoire d'installation suivant du logiciel Exocad: \DentalCADApp\library\implant
4. démarrez votre logiciel Exocad
5. vous avez réussi l'installation de la bibliothèque ZERAMEX® P6 ZERABASE.

Comment la bibliothèque est-elle importée dans votre système **3Shape**?

1. ouvrez le panneau de commande 3Shape Dental System Control Panel
2. outils ► Importation/Exportation
3. sélectionnez «zeramex_p6_v3». Enregistrez et fermez le «3Shape Dental System Control Panel».
4. vous avez réussi l'installation de la bibliothèque ZERAMEX® P6 ZERABASE.

Pour toute **question sur l'importation** des données dans votre logiciel, adressez-vous à **l'Assistance de votre fournisseur CAD/CAM**.

Commandez directement les pièces requises pour la restauration auprès de ZERAMEX®.

Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

order@zeramex.com